

クラミジアトラコマチスPCR [リアルタイムPCR法 (QUG)]


淋菌PCR [リアルタイムPCR法 (QUG)]

採取方法


- うがい液 (QUG) : 検体採取2時間前の食事・うがい・歯磨き・ガムを噛むことは避けてください。




1 生理食塩水をコップに15～20mL入れてください。生理食塩水15～20mLを口に含み、顔を上に向けて10～20秒間、勢いよく“ガラガラ”とうがいを行います。

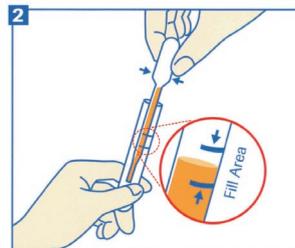

2 うがい液全量をコップに回収してスポイド等で搬送用チューブに移します。尿・うがい液搬送用チューブに記載されている2つのラインの間に収まるようにうがい液を加えてください。(約5 mL)

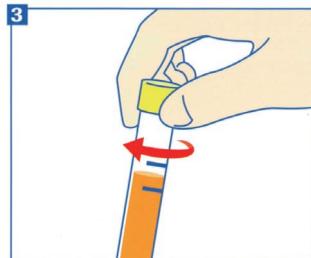

3 尿・うがい液搬送用チューブのキャップをしっかりと閉めてください。

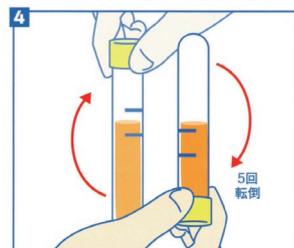

4 尿・うがい液搬送用チューブを5回転倒混和させてください。

注意事項

各チューブには4.3mLの保存液が入っています。絶対に凍結させないでください。